


BTL CardioPoint Telepítése

1. töltsük le, az e-mailben kapott linken keresztül a szofver telepítőt.



2. Nyissuk meg a letöltött dokumentumot.



Név	Módosítás dátuma	Típus	Méret
 590-57BTL_CardioPoint_v2-41-474-0-b	2023. 07. 05. 13:23	Lemezképfájl	955 366 KB

3. Kattintsunk rá duplán a „Setup” -ra



Név	Módosítás dátuma	Típus	Méret
Adobe	2022. 10. 14. 15:27	Fájlmappa	
Documents	2022. 10. 14. 15:27	Fájlmappa	
Drivers	2022. 10. 14. 15:27	Fájlmappa	
Framework	2022. 10. 14. 15:27	Fájlmappa	
License	2022. 10. 14. 15:27	Fájlmappa	
MEW	2022. 10. 14. 15:27	Fájlmappa	
SpiroAnimations	2022. 10. 14. 15:27	Fájlmappa	
Utility	2022. 10. 14. 15:27	Fájlmappa	
autorun	2022. 06. 22. 15:36	ICO fájl	19 KB
autorun	2022. 06. 22. 15:36	Telepítési információk	1 KB
Checksum_CP2.41.474.0.b.md5	2022. 10. 14. 15:41	MD5 fájl	74 KB
Setup	2022. 06. 22. 15:54	Alkalmazás	5 380 KB

4. Telepítés lépésről lépésre

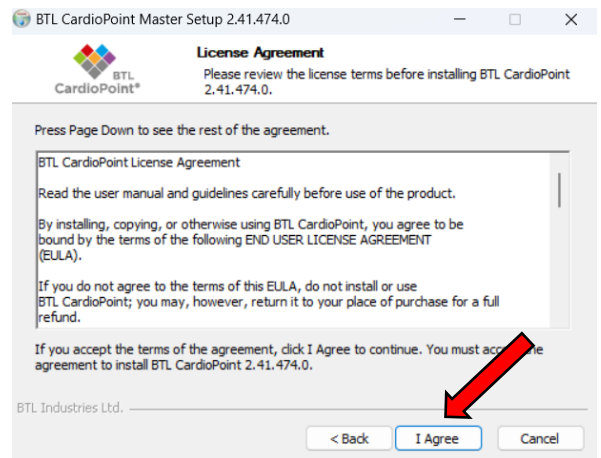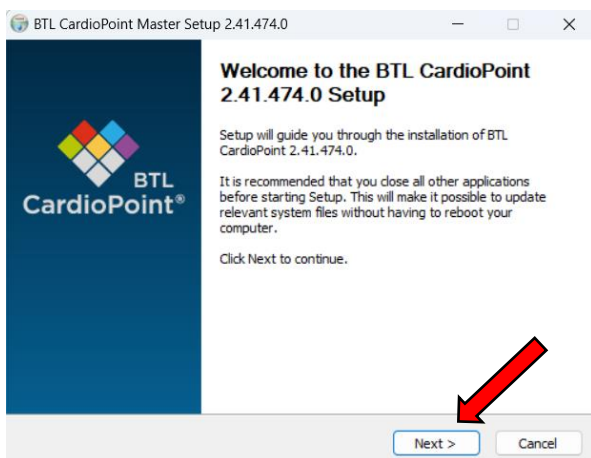


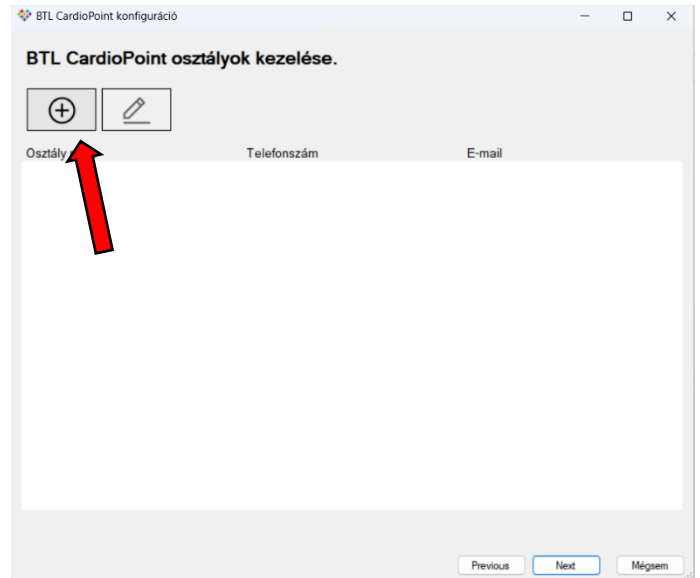
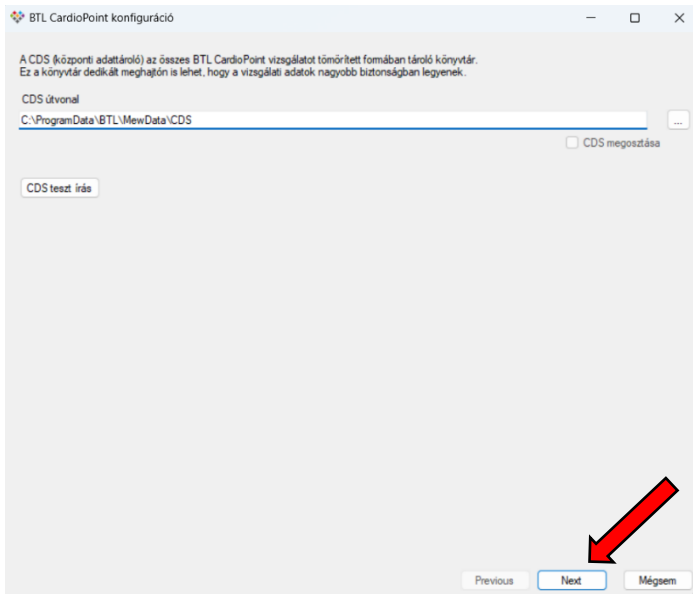


5. Írjuk be Praxisunk adatait, majd mentjük és kattintsunk a „Next”gombra

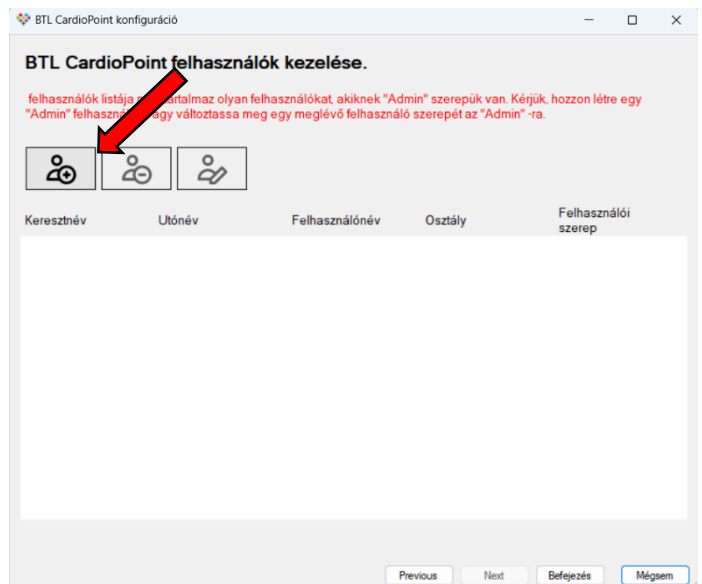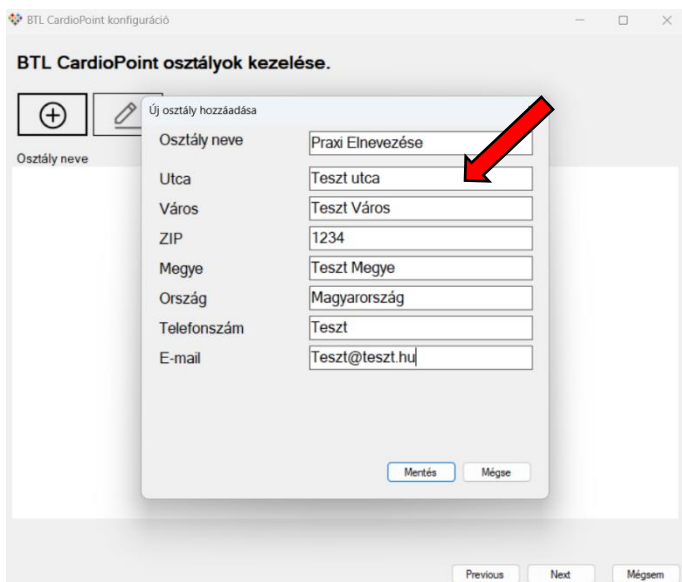



6. Vigyük fel saját adatainkat. Felhasználói szerepünket tegyük át „Admin”-ra, illetve állítsuk be a nyelvet Magyarra.

7. **Fontos!!** A kapott jelszót másoljuk vágólapra. **A számítógépet ne indítsuk újra!**

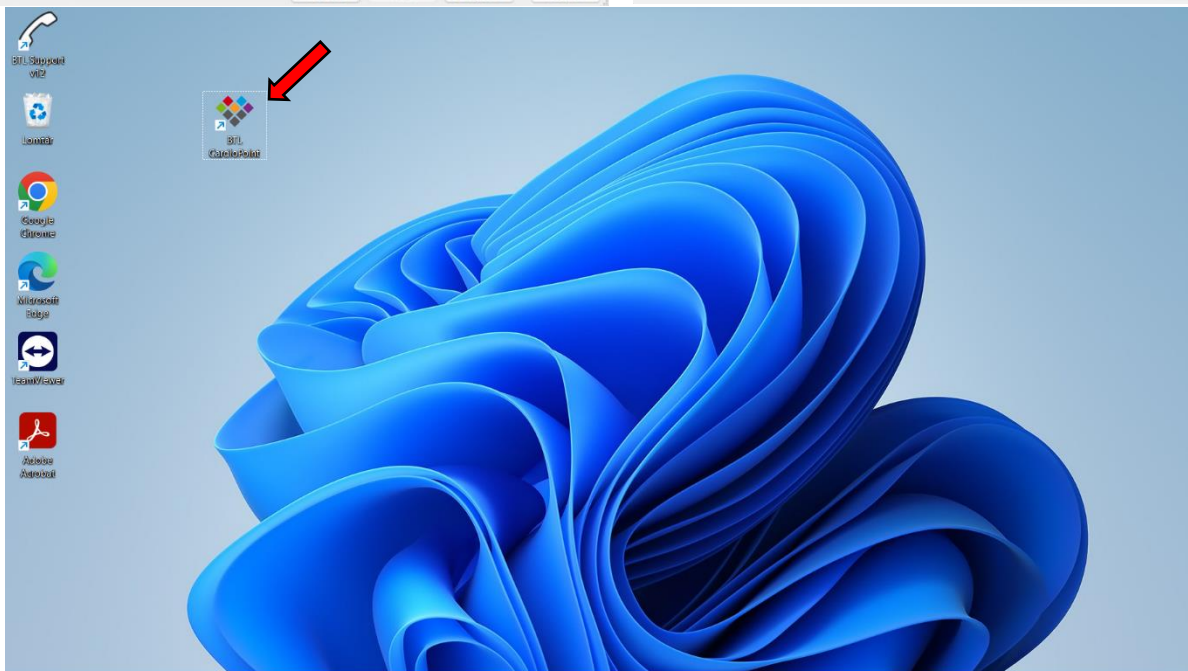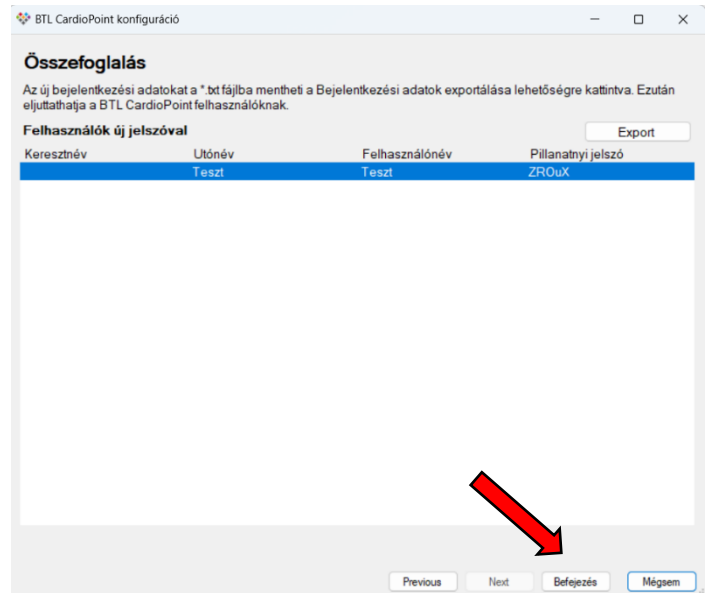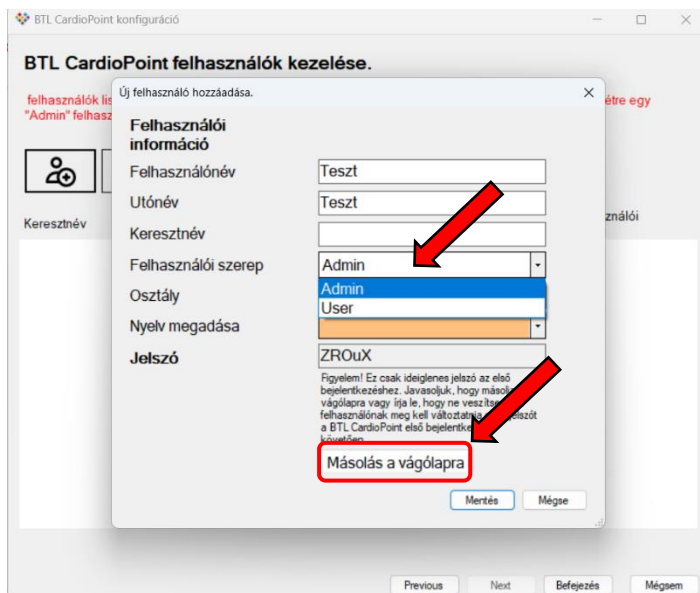

8. **Mentés és Befejezés.** Ezt követően nyissuk meg az asztalunkon megjelent ikont duplakattintással.


9. **CTR+V** gombok megnyomásával vagy jobb egérgomb kattintással másoljuk be a jelszót. Ezt Követően ismételten bemásoljuk a jelszót és megadunk egy újat. Szeretnénk kérni, hogy a jövőben az egyszerűbb szervizelés miatt a btl12345 jelszót használják.

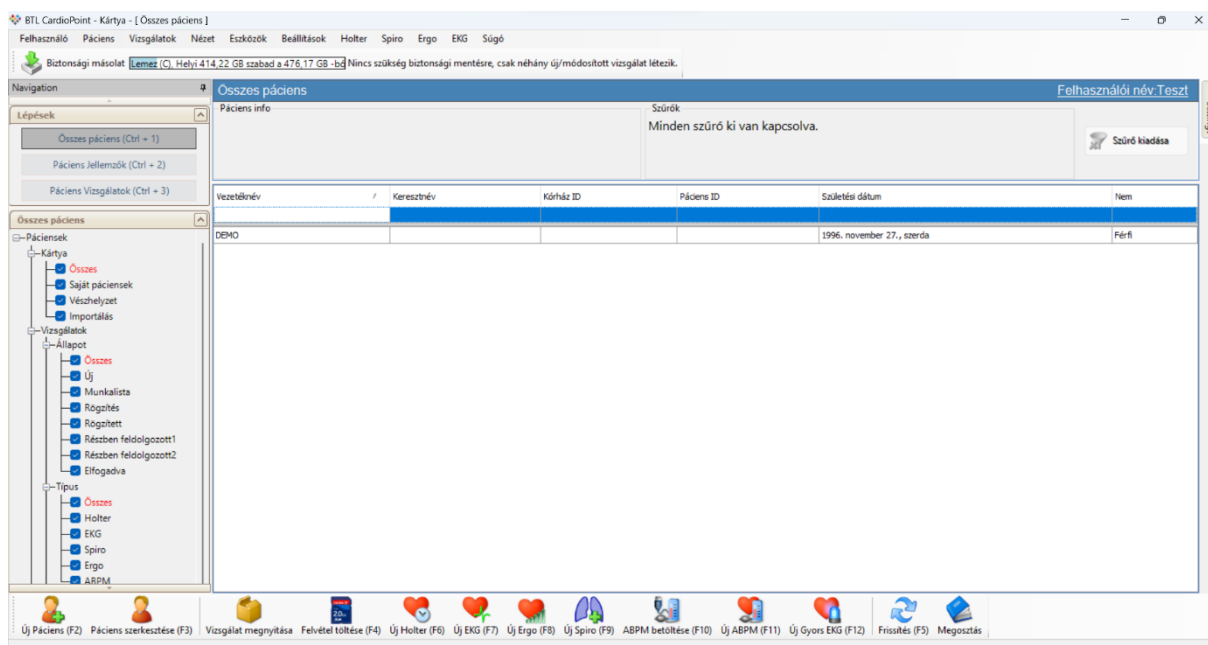
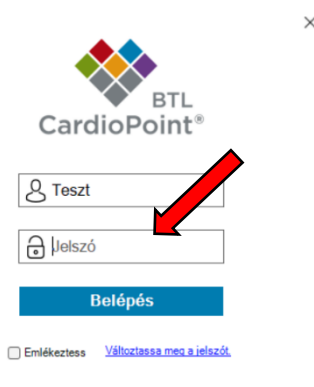


10. **License kulcs betöltése:** E-mailben megkapott BTL CardioPoint License kulcsot letöltjük, dupla kattitással betöltjük.

no-reply

BTL CardioPoint License - Dear Sir/Madam, you can find your license for the BTL CardioPoint in the attachment. Wit...

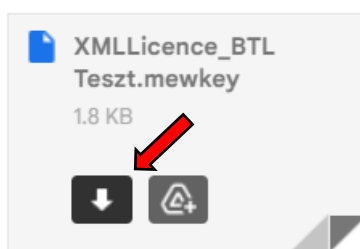

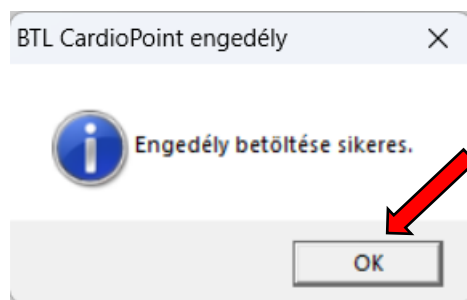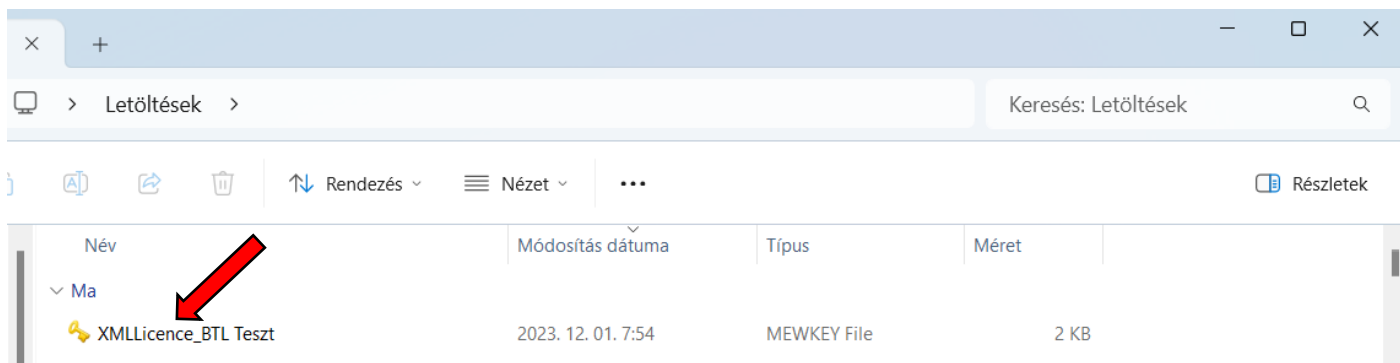

11.A CardioPoint használatra készen áll!