
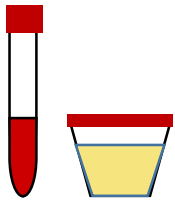




KELLÉKEK

POSTAI szállításhoz

- 

1 papírvatta

beküldendő minta (elsődleges konténer), nedvszívó anyag
- 

2 szivárgásmentesen zárható tartály vagy műanyag tasak
- 

3 postai szállításra alkalmas kartondoboz (egyik oldali mérete legalább 10x10 cm legyen)

FUTÁR általi szállításhoz

- 

1 papírvatta

beküldendő minta (elsődleges konténer), nedvszívó anyag
- 

2 mintatároló állvány és egy akkora műanyag zsák (pl. autoklávozható zsák), amelybe az egész állvány befér
- 

3 fertőtleníthető, hőszigetelt (pl. hungarocell bélésű kartondoboz, vagy hungarocell doboz) vagy hűtőtáska
- 


4 hűtőközeg (jégakku)
- 

5 fertőtlenítőszer (a csomagolási lépések között és a végén (munkafelület) fertőtlenítsen)


Csomagolás postai szállításhoz:





Húzzon fel egy gumikesztyűt!

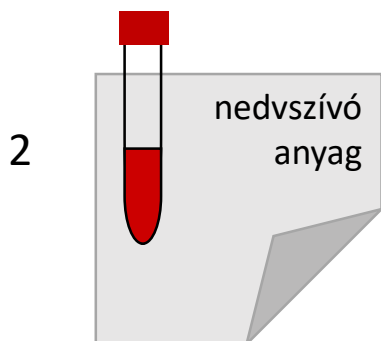


Nedvszívó anyaggal (pl. papírvatta) tekerje körbe a mintát tartalmazó edényt.

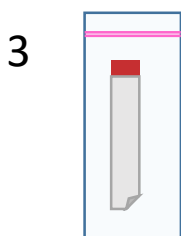

Helyezze a mintát egy szivárgásmentesen zárható műanyag tasakba (vagy a postai szállításhoz biztosított tartályba) és zárja le. Ezt követően vegye le a gumikesztyűt (és kezelje veszélyes hulladékként)!

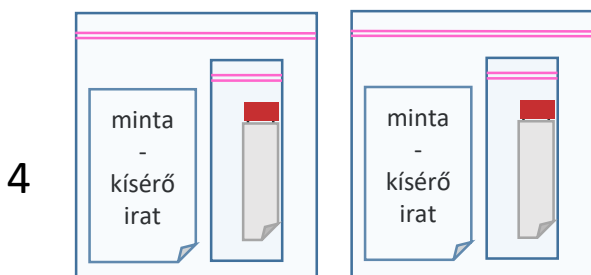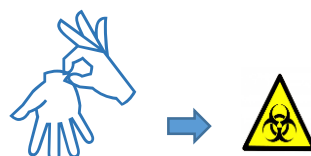

Több minta egyidejű szállításához külön tasakokba csomagolja a mintákat, mindegyik mellé helyezve a saját kísérőiratát (dupla csomagolásban).

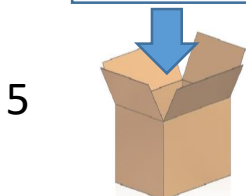


A mintát tartalmazó tasakot és a kísérőiratokat tegye egy postai szállításra alkalmas kartondobozba.

Csomagolás futár általi szállításhoz:



Húzzon fel egy gumikesztyűt!

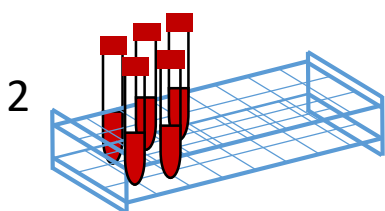

Tegye a mintákat tartalmazó csöveket állványba (nagyobb tárolóedényeket úgy helyezzen el a hűtőtáskában, hogy stabilan, függőleges helyzetben maradjanak a szállítás idején! Az állványt helyezze egy autoklávozható zsákba és tegyen nedvszívó anyagot (pl. papírvatta) az állvány alá (ezt szállítás után kezelje veszélyes hulladékként!) Vegye le a gumikesztyűt.



Az állványt tartalmazó zsákot és a hűtést biztosító jégakkut tegye a hűtőtáskába. Minden szállítás után fertőtlenítse az állványt, a jégakkut és a hűtőtáskát! A kísérőiratokat külön csomagolva szállítsa!